



AkusTone^{ALERT}™

krople do uszu

Instrukcja używania

Wyrób medyczny **AkusTone alert** zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (*Otitis externa*) objawiających się bólem, świądem i zaczerwienieniem oraz związanych np. z nieprawidłową higieną, obecnością czopa woskowinowego lub tzw. uchem pływaka.

AkusTone alert stwarza w zewnętrznym przewodzie słuchowym warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów, takich jak bakterie i grzyby, będących głównymi przyczynami zapalenia ucha zewnętrznego. Dodatkowo w wyrobie zastosowane zostały olejki zapachowe: geraniowy i z drzewa herbacianego, będące jednocześnie naturalnymi konserwantami zapobiegającymi rozwojowi drobnoustrojów. Zawarty w kroplach glicerol, dzięki właściwościom nawilżającym i powlekającym łagodzi podrażnienia, a także zmiękcza naciskający na ścianki przewodu słuchowego czop woskowinowy, ułatwiając jego usunięcie.

AkusTone alert może być również stosowany zapobiegawczo u osób z tendencją do nawracających infekcji zewnętrznego przewodu słuchowego związanych z częstym lub długim kontaktem z wodą (tzw. ucho pływaka).

AkusTone alert:

- zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (*Otitis externa*), objawiających się:
 - bólem,
 - świądem,
 - zaczerwienieniem,

- stwarza warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów,
- nawilża i łagodzi podrażnienia,
- do stosowania zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania tzw. ucha pływaka.

Skład:


Woda oczyszczona, glicerol, polisorbat 80, olejek z drzewa herbacianego, chlorek cetylopirydyniowy, kwas octowy, olejek geraniowy, octan sodu.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, otwartych ran lub gdy w uchu znajduje się ciało obce a także równocześnie z innymi miejscowo działającymi produktami do uszu. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. Nie należy podawać wyrobu do ucha z założonym aparatem słuchowym. Wyrób należy aplikować co najmniej na godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego. Każdy silny ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem. Ból ucha u dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem. Wyrób jest przeznaczony do stosowania doraźnego. Jeżeli po upływie 2 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 2 dni od rozpoczęcia stosowania pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza. Wystąpienie dodatkowych objawów takich jak gorączka, wyciek z ucha lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie i sposób postępowania z wyrobem:

Wyrób przeznaczony jest do miejscowego stosowania w przewodzie słuchowym zewnętrznym przez dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.



W stanach zapalnych ucha zewnętrznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej: 1-2 krople 3-4 razy dziennie.

W celu zapobiegania infekcjom zewnętrznego przewodu słuchowego (tzw. ucho pływaka): 1-2 krople po kąpeli w basenie. Kroplomierza (końcówki aplikatora) nie należy wsuwać głęboko do ucha żeby nie uszkodzić narządu słuchu.


Sposób aplikacji wyrobu:



1. Energicznie wstrząśnij wyrób przed użyciem.



2. Przechyl głowę lub połóż się na boku tak, aby ucho było zwrócone ku górze, następnie delikatnie pociągnij płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi.

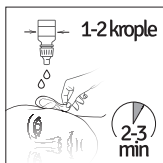

3. Naciskając na butelkę, wpuść do przewodu słuchowego 1-2 krople wyrobu i pozostań w przyjętej pozycji przez 2-3 minuty. Ze względów higienicznych w trakcie aplikacji staraj się nie dotykać ucha kroplomierzem.




4. Po wyprostowaniu się z ucha wydostanie się nadmiar płynu, który należy wytrzeć czystą chusteczką.



5. Po użyciu dokładnie zakręć butelkę.

Miejsce i warunki przechowywania:

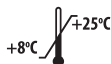

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice



Data wydania instrukcji: 06/2020

Oznaczenie symboli na opakowaniu:




nr serii



termin ważności



zajrzyj do instrukcji używania

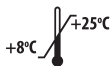

ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



wytwórca